

MODELL	MIO-IONOTENS		
<p style="text-align: center;">INHALT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TENS/NEMS/FES Elektrotherapie mit grafischen Display • 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar) • Gegelte, selbsthaftende Elektroden • Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting) • Ladegerät • Gürtelhalterung • Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden • Tragetasche • Ionophoresekit 			
<p style="text-align: center;">TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen; • zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung. • Monophasische rechteckige Welle; • 3 IONOPHORESE Programme; • 7 REHABILITATIONS Programme; • 14 TENS Programme; • 12 frei programmierbare Speicher TENS – NEMS; • Einfache Menüführung; • Verbleibende Therapiezeit und Programminstruktionen werden im Display angezeigt.; • Interne wieder aufladbare Batterien (herausnehmbar). • Backlight display; • Maximale Intensität: 200 mApp; • CE0476 medical device <p>MIO-IONOTENS wurde speziell für die Rehabilitation und die funktionelle Erholung entwickelt. Der Einsatz ist für Pathologien wie Arthritis, Arthrose, Lumbalgie (Rücken), Ischias und Halswirbelbereichs- (cervical) Schmerzen, Muskelbeanspruchungen, etc., vorgesehen.</p> <p>MIO-IONOTENS hat 3 spezifische Programme um IONOPHORESE durchzuführen. IONOPHORESE ist eine Technik der Elektrotherapie, welche Strom nutzt um Medizin (Schmerzmittel) direkt an die schmerzende Stelle zu bringen. Diese Technik birgt 2 Vorteile: keine orale Einnahme von Medizin (Schmerzmittel); und die Medizin wirkt direkt an der schmerzenden Stelle.</p>			
P 14 TENS Programme	10 REHAB programs	13 freie Speicher	
Tens konventionel (schnell)	Ionophoresis L	TENS mem 1	
Tens endorphin (verzögert)	Ionophoresis M	TENS mem 2	
Tens Hyperstimulation	Ionophoresis H	TENS mem 3	
Entzündungshemmend	Mikrostrom	TENS mem 4	
Cervicalgie/Spannungskopfschmerzen	Hämatom / Bluterguss	TENS mem5	
Rückenschmerzen/Ischialgie	Ödem	NEMS mem1	
Verstauchungen / Blutergüsse	Tens sequentiell (fortlaufend)	NEMS mem2	
Durchblutung/Vaskularisierung	Tens Burst (Impuls)	NEMS mem3	
Entspannung der Muskeln	Atrophy (Muskelschwund) Vorsorge	NEMS mem4	
Handgelenkschmerzen	Muskelschwund	NEMS mem5	
Fusssohlen Stimulation		NEMS alternierende Kanäle 1/2	
Epicondylitis / Tennisarm		NEMS alternierende Kanäle 1/2	
Epitroclea / Golferarm		Batterie Test	
Periarthritis /			
Schultergelenkentzündung			
<p>Abmessungen: 140 X 70 X 30 mm</p>			