




Polarität	Programm	Anzahl Behandlungen	Häufigkeit der Behandlung	Position der Elektroden
Ionophoresis mit Medikament welches eine <b>positive</b> Polarität haben	P01, P02, P03, P15, P16 Gerät: Mio-Ionotens	10/15	Täglich oder je nach medizinischer Indikation	 <p>Befeuchten Sie die schwammartigen Elektroden mit Wasser und bringen Sie das Medikament auf der feuchten Elektrode auf, welche mit dem positiven Pol angeschlossen ist (rote Verbindung). Diese Elektrode auf der schmerzenden Stelle anbringen. Die andere Elektrode daneben (gegenüber) anbringen. Befestigen Sie die Elektroden mit dem Klettband.</p>
	Ionophoresis 1 oder Ionophoresis 2 Geräte: T-One Medi/Medi Pro			
	P12 oder P13 Gerät: Mio-Peristim			
Ionophoresis mit Medikament welches eine <b>negative</b> Polarität haben	P01, P02, P03, P15, P16 Gerät: Mio-Ionotens	10/15	Täglich oder je nach medizinischer Indikation	 <p>Befeuchten Sie die schwammartigen Elektroden mit Wasser und bringen Sie das Medikament auf der feuchten Elektrode auf, welche mit dem negativen Pol angeschlossen ist (schwarze Verbindung). Diese Elektrode auf der schmerzenden Stelle anbringen. Die andere Elektrode daneben (gegenüber) anbringen. Befestigen Sie die Elektroden mit dem Klettband.</p>
	Ionophoresis 1 oder Ionophoresis 2 Geräte: T-One Medi/Medi Pro			
	P12 oder P13 Gerät: Mio-Peristim			
Ionophoresis mit Medikament welches eine doppelte (neutrale) Polarität haben	P01, P02, P03, P1, P16 Gerät: Mio-Ionotens	10/15	Täglich oder je nach medizinischer Indikation	 <p>Befeuchten Sie die schwammartigen Elektroden mit Wasser und bringen Sie das Medikament auf der feuchten Elektrode auf, welche mit dem positiven (rot) oder negativen (schwarz) Pol angeschlossen ist. Diese Elektrode auf der schmerzenden Stelle anbringen. Die andere Elektrode daneben (gegüber) anbringen. Befestigen Sie die Elektroden mit dem Klettband.</p>
	Ionophoresis 1 oder Ionophoresis 2 Geräte: T-One Medi/Medi Pro			
	P12 oder P13 Gerät: Mio-Peristim			

**Wichtig:** Wir empfehlen die Behandlung mit Ionophoreseprogrammen mit niedriger Frequenz zu beginnen.

Geräte:

Mio-IONOTENS

T-ONE Medi / Medi Pro

Mio-Perisitm

Programme:

P01

IONOPHORESIS 1

P12

Diese Programme transferieren das Medikament langsamer, die Wahrscheinlichkeit der Hauterrötung ist geringer.

Hauterrötung ist eine natürliche Reaktion: bitte lassen Sie sich davon nicht stören, sie klingt nach einigen Minuten. Sollte sie nachhaltig bestehen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Therapeuten.